


# LiNA SeaStar™ och LiNA Skin Hook™

Komplett engångssystem för  
att dra tillbaka mjuk vävnad från  
operationsytan

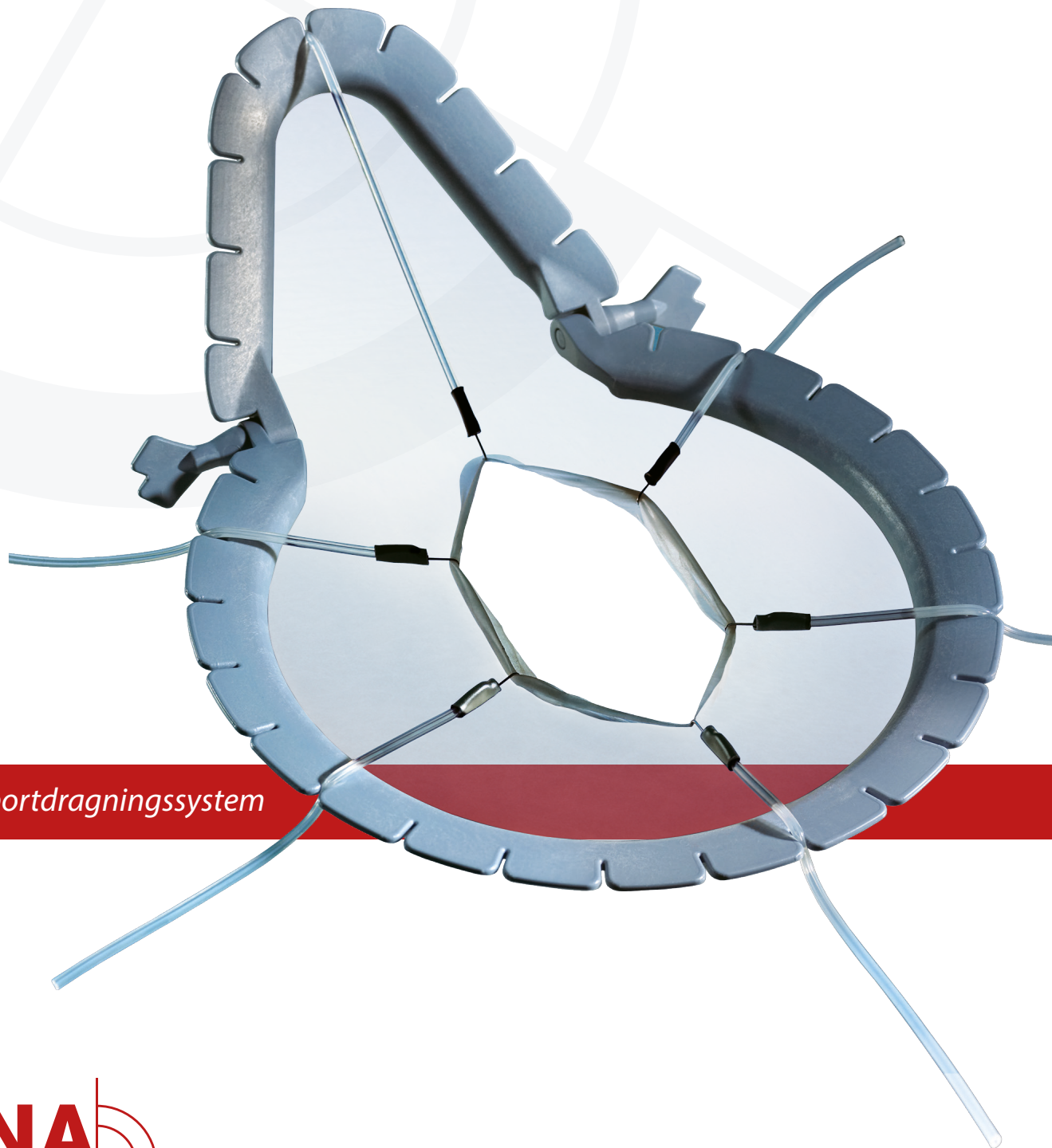


*Elastiskt bortdragningsystem*



Innovation inom gynekologi

# LiNA SeaStar™ och LiNA Skin Hook™

LiNA SeaStar™ och LiNA Skin Hook™ utgör en engångslösning för att dra tillbaka känslig mjuk vävnad. Systemets flexibla utformning möjliggör att LiNA SeaStar™ kan justeras och omplaceras under de kirurgiska ingreppen och exponerar operationsområdet.

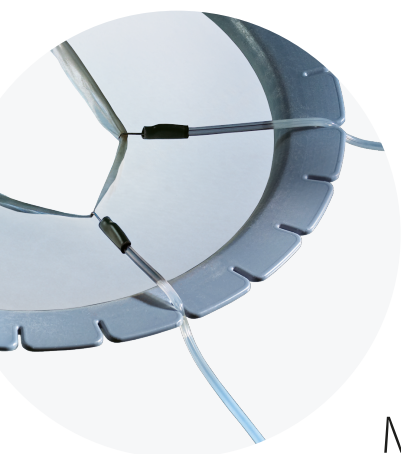

**Synlighet. Självbevarande.**

#### Frigör kirurgens händer

LiNA SeaStar™ och LiNA Skin Hook™ ger bättre operationsutrymme och synlighet. Låter dig fokusera på att operera, utbilda och öva istället för att dra tillbaka.


**Mångsidighet. Stort utbud tillgängliga alternativ.**

#### LiNA SeaStar™


LiNA SeaStar™ finns i många former och storlekar. Ramarna kan justeras för att passa olika anatomiska områden vilket möjliggör olika kirurgiska tillämpningar, t.ex. vaginal och rektal kirurgi, och andra kirurgiområden.

#### LiNA Skin Hook™


LiNA Skin Hook™ finns tillgänglig med tre olika alternativ för kroken av rostfritt stål: liten och vass, liten och trubbig samt stor och trubbig. De flexibla och elastiska banden kan justeras under ingreppet för att skapa optimal spänning.

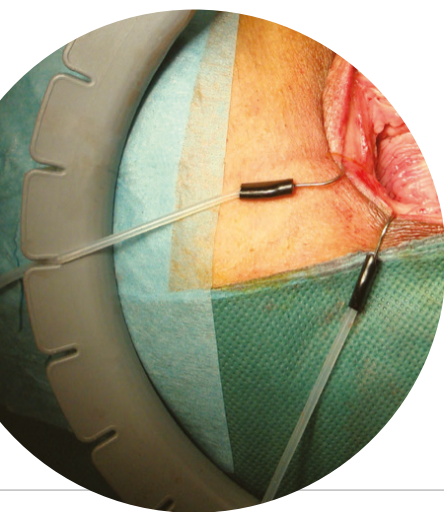


Förbered och lägg duk runt operationsområdet på vanligt sätt. Applicera LiNA SeaStar™ enligt följande steg:

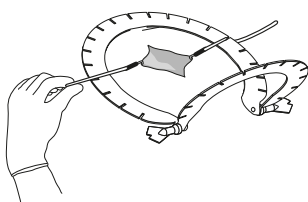

1. Placera LiNA SeaStar™ runt det första snittet och sätt in LiNA Skin Hook™ i direkt motsatta kvadranter med samma spänning.

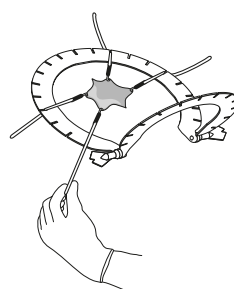

2. Medan dissekeringen fortskrider, flytta LiNA Skin Hook™ till fascians djupare lager. Du kan sedan tillföra nya LiNA Skin Hooks eller omplacera de som redan finns för att uppnå en helt balanserad bortdragning, oavsett vinkel.

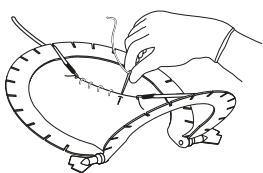


3. För att stänga lättare, bibehåll konstant motspänning.




# LiNA SeaStar™ och LiNA Skin Hook™


LiNA SeaStar™ och LiNA Skin Hook™ är för engångsbruk.

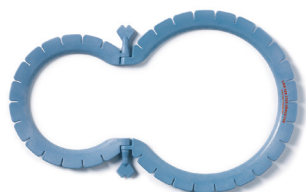


REF 4000-S-SL

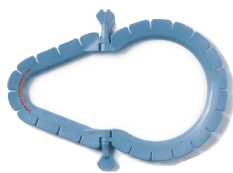


REF 4000-S-VS

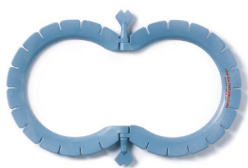


REF 4000-S-SS

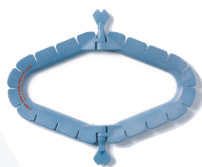

REF 4000-S-VV

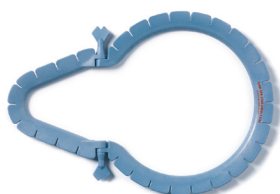

REF 4000-S-VL

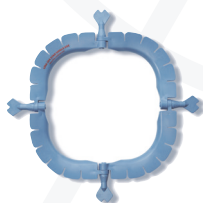

REF 4000-S-Q

LiNA Skin Hooks  
är i verklig storlek



REF SH-110  
Liten vass krok



REF SH-120  
Liten trubbig krok



REF SH-220  
Stor trubbig krok

## Orderinformation:

LiNA SeaStar™ och LiNA Skin Hook™ **CE 0459**

Produktkod	Beskrivning	ANTAL
4000-S-SL	LiNA SeaStar™ – Liten/stor. Engångsbruk.	Förpackning med 5 stycken, sterila
4000-S-SS	LiNA SeaStar™ – Liten/liten. Engångsbruk.	Förpackning med 5 stycken, sterila
4000-S-VL	LiNA SeaStar™ – V-form/stor. Engångsbruk.	Förpackning med 5 stycken, sterila
4000-S-VS	LiNA SeaStar™ – V-form/liten. Engångsbruk.	Förpackning med 5 stycken, sterila
4000-S-VV	LiNA SeaStar™ – V-form/V-form. Engångsbruk.	Förpackning med 5 stycken, sterila
4000-S-Q	LiNA SeaStar™ – Kvadratisk. Engångsbruk.	Förpackning med 5 stycken, sterila
SH-110	LiNA Skin Hook™ – Liten vass krok. Engångsbruk.	2 stycken i en påse, förpackning med 5 påsar, sterila
SH-120	LiNA Skin Hook™ – Liten trubbig krok. Engångsbruk.	2 stycken i en påse, förpackning med 5 påsar, sterila
SH-220	LiNA Skin Hook™ – Stor trubbig krok. Engångsbruk.	2 stycken i en påse, förpackning med 5 påsar, sterila

Distributör:

©2019 LiNA Medical ApS. Med ensamrätt.

LiNA är ett registrerat varumärke som tillhör LiNA Medical i EU, USA och Kina.

LiNA Medical ApS

• Formervangen 5  
DK-2600 Glostrup  
Danmark

• Tel.: +45 43 29 66 66  
Fax: +45 43 29 66 99  
info@lina-medical.com

• www.lina-medical.com  
CVR: 10054974

EN ISO 13485:2016  
Kvalitetsstyrningssystem

