


Snabbguide

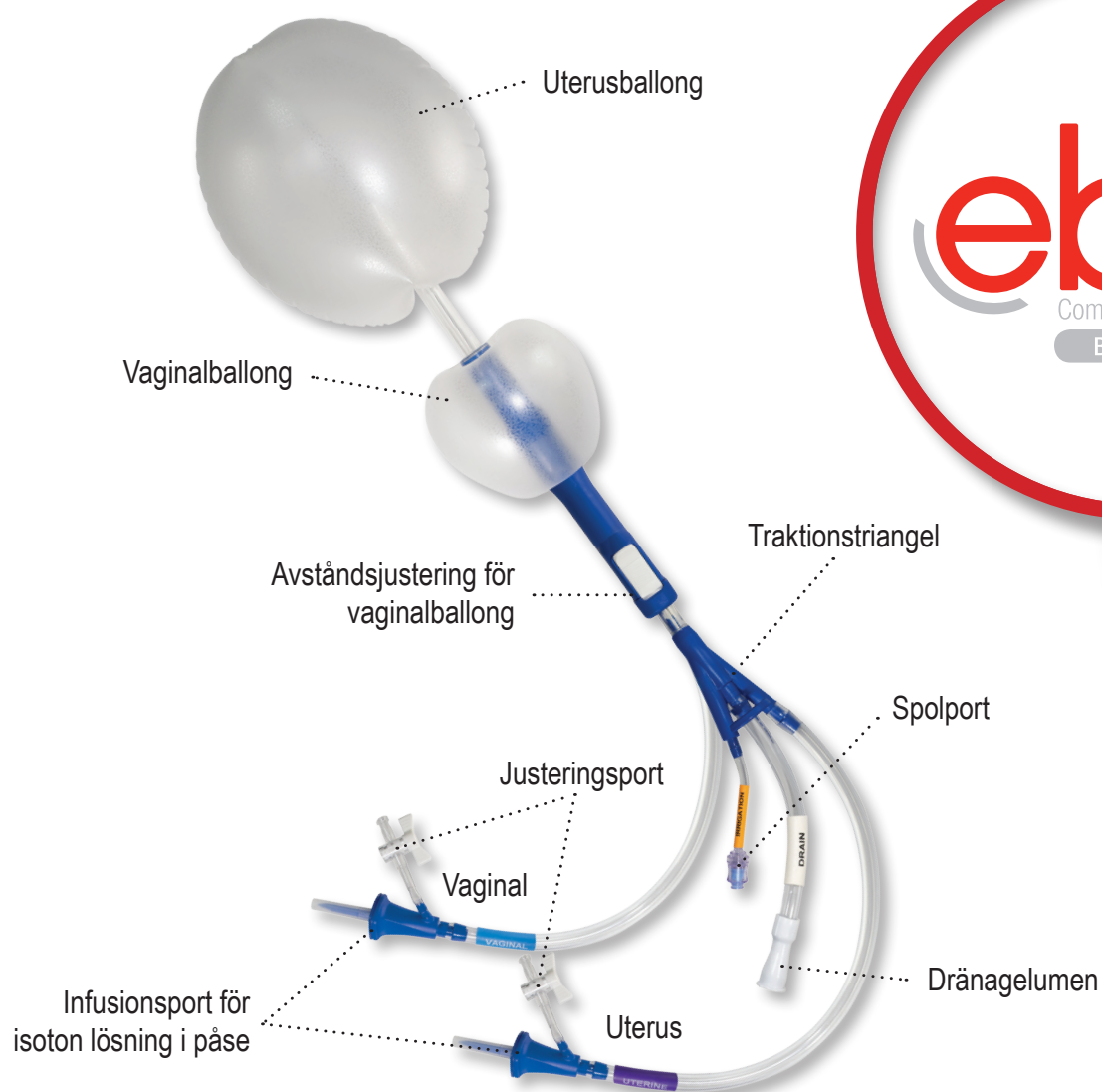

ebb[®]
Complete Tamponade System
BY BELFORT AND DILDY

Beskrivning

Det kompletta tamponadsystemet ebb är tillverkat av stark, formbar polyuretan som anpassar sig till livmoderns anatomi. Det är det enda tamponadsystemet som har dubbla ballonger för att kontrollera både uterina och vaginala blödningar och som kan fyllas snabbt från en påse med isoton lösning.

Indikation:

ebb är avsett att användas för temporär kontroll eller minskning av postpartumblödning från livmodern. Fyllning av vaginalballongen förankrar uterusballongen och fungerar som vaginal tamponad vid vaginal blödning. ebb ska endast användas vid postpartumblödning från livmodern när konservativ behandling är motiverad.

För hjälp, ring 040 - 30 51 05.

Se bipacksedeln för fullständiga anvisningar, varningar, kontraindikationer och försiktighetsåtgärder.

Den här snabbguiden är varken avsedd eller ska användas som ersättning för bipacksedeln/bruksanvisningen.



747 West 4170 South
Murray, Utah USA 84123
Tel: 801-268-8200
Fax: 801-266-7373
Kostnadsfritt: 888-268-6222
www.clinicalinnovations.com


7 enkla steg för behandling av postpartumblödning

Fäll ihop ballongen

- Fäll ihop uterusballongen löst runt och över spetsen
- Fäll ihop vaginalballongen

OBS! Kranarna är öppna i förpackningen och ska vara öppna så att luft kan passera ut

1

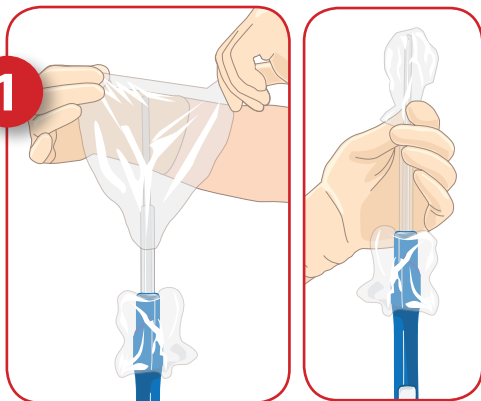

För in

- För in genom att skåla handen om kateterändan med uterusballongen och föra in den genom den dilaterade livmoderhalsen till fundus


- Eller för in katetern genom livmoderhalsen till fundus med en vridrörelse

OBS! Använd ultraljud under införandet, fyll och bekräfta placeringen

2



ELLER

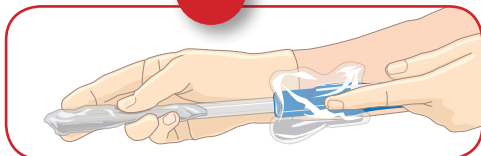

Fyll uterusballongen

- Stäng kranarna och ta av locken från spetsens ventiler
- Stick in spetsen i påsen med isoton lösning och fyll genom att klämma varsamt (eller använd spruta och kranar)



- Börja med att titrera med 250 ml

- Fyll stegvis tills önskad fyllvolym nås


- Placera ena handen i vagina och andra handen på livmodern för att bekräfta korrekt placering

OBS! Rekommenderad maximal fyllvolym är 750 ml

3

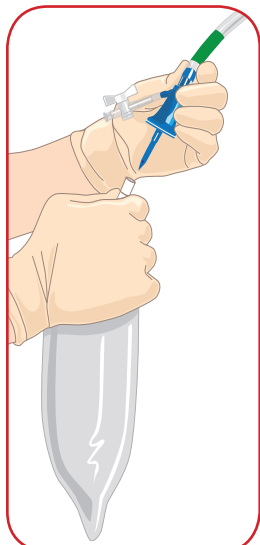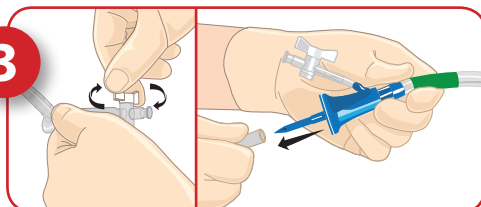




ELLER

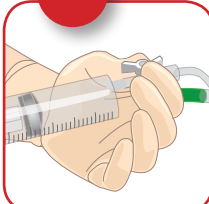

Placera vaginalballongen (valfritt)

- För att flytta, lås upp skjutreglaget genom att skjuta låsknappen framåt tills ett klickljud hörs
- Justera vaginalballongen till önskat läge
- Lås fast på plats genom att trycka ned låsknappen tills ett klickljud hörs
- Fyll vaginalballongen till maximalt 300 ml med isoton lösning på samma sätt som uterusballongen fylldes


5

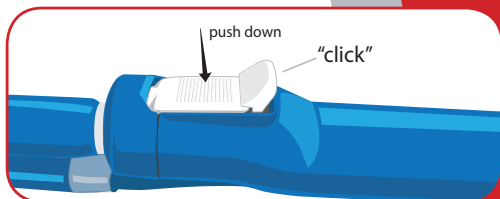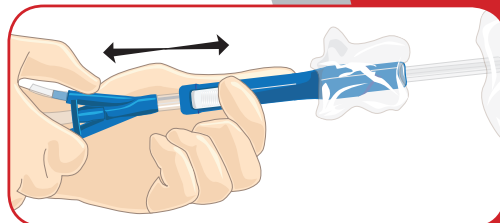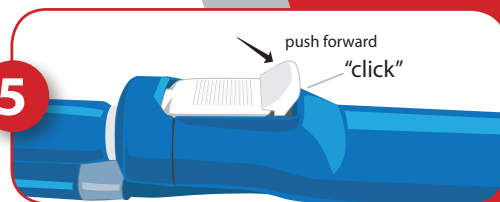

Övervaka dränage

- Använd en graderad behållare med dränagelumen för att mäta blodförlusten och övervaka eventuell fortsatt blödning*



6

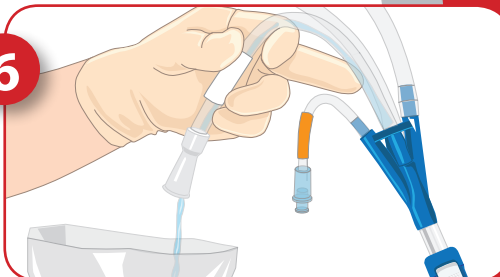

Töm / ta ut

- Öppna kranarna för att långsamt tömma ut vätskan
- Titrera i enlighet med sjukhusets protokoll
- Klipp av slangen innan systemet dras ut för att säkerställa att det inte finns någon vätska kvar i katetern

7

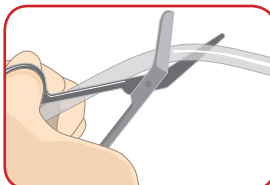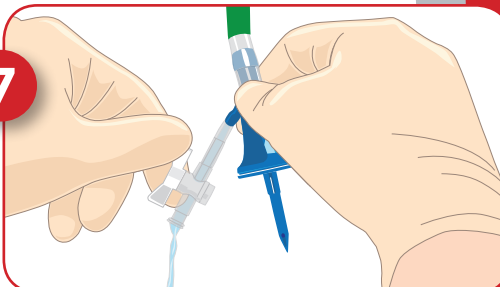


OBS! Om det finns behov av att tömma ballongen snabbt, så klipp av katetern

Övervaka fyllvolymen

- Håll fingertopparna vid livmoderhalsen för att säkerställa att ballongen stannar på plats under fyllningen och att den inte fylls för mycket, särskilt vid fokal atoni


OBS! Vid fokal atoni kan fyllvolymen vara mindre än vid global atoni

4

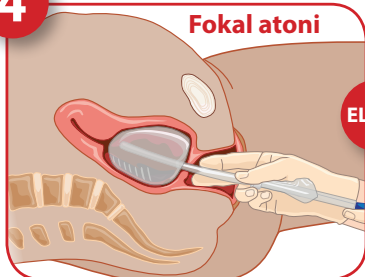

Fokal atoni

ELLER

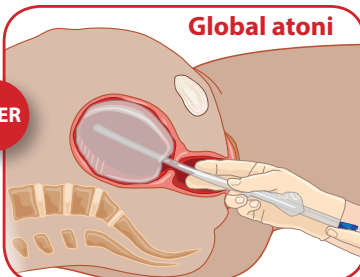

Global atoni

Se bipacksedeln för fullständiga anvisningar, varningar, kontraindikationer och försiktighetsåtgärder.

*Kontrollera vid behov att dränagelumenet är öppet genom att spola med en liten volym isoton lösning genom spolporten.

Indikation: ebb är avsett att användas för temporär kontroll eller minskning av postpartumblödning från livmodern. Fyllning av vaginalballongen förankrar uterusballongen och fungerar som vaginal tamponad vid vaginal blödning. ebb ska endast användas vid postpartumblödning från livmodern när konservativ behandling är motiverad.

ebb
Complete Tamponade System
BY BELFORT AND DILLY