


### STEG 1 INSÄTTNING




- Vik ihop kudden
- Förse kudden med gel
- För in kudden vaginalt så att ballongen får kontakt med fostrets huvud

### STEG 2 PLACERING

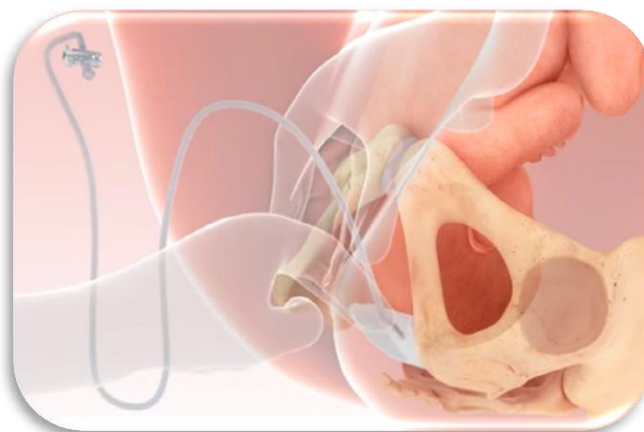


- Tryck kudden så långt posteriort som möjligt, tills den når coccyx
- Placeringen liknar den vid en posterior sugklocka

### STEG 3 BEN NED

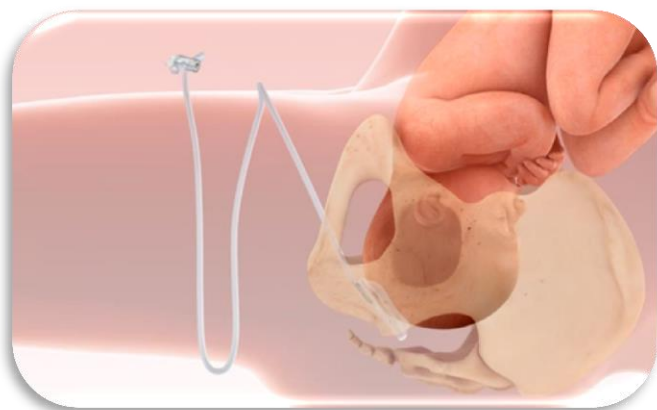

- Lägg ner benen platt på operationsbordet – i annat fall kan kudden trilla ut eller hamna i felaktigt läge

### STEG 4 FYLL UPP

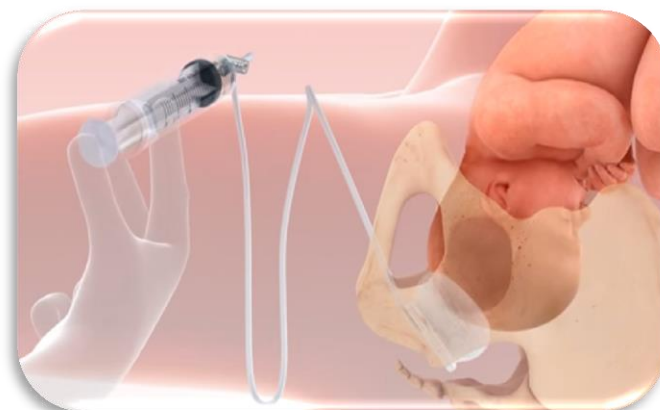

- Fyll upp kudden med 180ml **Natriumklorid** genom att använda den medföljande 60ml sprutan - **Tre Fulla Sprutor**