



- Reducerar risken för ofrivillig utdragning av katetern
- Reducerar risken för att katetern stöts ut av kroppen
- Säker infästning och skydd av katetern upp till en vecka
- Mjuk profil och ytstruktur för optimal patientkomfort
- Möjliggör för patienten att duscha med katetern på plats
- Förhindrar kontamination av insticksstället från omgivningen
- Förhindrar knickbildning av katetern
- Minimal risk för hudirritation
- Standardiserad fixering av katetern

## **Pleura-Guard** 8161

*Fixeringsförband för pleura dränage katetrar*



## Pleura-Guard

### Säker fixering av pleuradränage

Pleura-Guard är ett specialförband för fixering av pleuradränage från 16 French till 30 French. Förbandet består av en fäst sida mot huden med en självhäftande, hudvänlig hydrokolloid platta kombinerad med en specialkudde av skumgummi som effektivt förhindrar att slangen knickar. Förbandet minskar risken att slangen stöts ut och förhindrar dessutom att slangens rörelser medverkar till att vidga utgångshålet, vilket bidrar till mindre läckage.

Ett genomskinligt hydrokolloid skydd täcker utgångshålet och förhindrar kontamination samtidigt som den erbjuder möjlighet till inspektion.

Hydrokolloidskyddet fungerar som barriär och absorberar exudat. Pleura-Guard förhindrar därmed uppluckring av huden och tillväxt av mikroorganismer.

Användning av suturer för att fixera slangen kan uteslutas i de flesta fall och den smidiga designen av Pleura-Guard tillåter fixering av två slangar nära intill varandra.

### Patientvänlig fixering

Den smidiga designen av Pleura-Guard ersätter otympliga hemmagjorda lösningar av olika kompresser som fixeras med non-woven material av skilda slag. Pleura-Guards smidiga design erbjuder dessutom patienten ökad bekvämlighet och större rörelsefrihet eftersom man kan utesluta suturering. Detta innebär större trygghet för patienten. Som en ytterligare bekvämlighet för patienten möjliggör förbandet kroppstvätt och försiktig dusch.

### Minskar tiden för omläggning

Den effektiva absorptionen av exudat kombinerat med en säker fixering och möjligheten att inspektera utgångshålet minskar avsevärt behovet av att byta förband. Förbandet sitter normalt kvar på patienten 4-5 dagar och kan sitta kvar upp till en vecka om det är nödvändigt. Den minskade tiden för förbandsbyten och omläggningar gör Pleura-Guard till ett kostnadseffektivt alternativ.

### Enkel att använda

Pleura-Guard appliceras enkelt och snabbt på patientens hud och möjliggör en standardiserad och säker fixation av slangen.



### Orderinformation:

**CE**  
Pleura-Guard 0459

REF.	Produkt	Förpackning
8161	Pleura-Guard - Specialförband för pleura dränage katetrar	1 st i steril förpackning, 25 st sterilförpackningar per låda

KEBOMED A/S

• Jernholmen 43  
DK-2650 Hvidovre  
Danmark

• Tel.: 040 305 105  
Fax: 040 305 106  
info@kebomed.se



Copenhagen MedLab ApS

• Formervangen 5  
DK-2600 Glostrup  
Denmark